



bionette

Naudojimo instrukcija

Efektyviam alerginio rinito gydymui

BioNette™

Tai inovatyvus ir modernus prietaisas, skirtas alerginio rinito (šienligės) gydymui. **BioNette™** suteikia palengvėjimą ir efektyviai apsaugo nuo simptomų, susijusių su alerginiu rinitu, pavyzdžiui: ryklės, akių, ausų, nosies niežulys, sloga, čiaudulys, galvos skausmas ir ašarojimas. Gydymas nėra cheminis ar farmakologinis bei neturi jokio pašalinio poveikio. **BioNette™** prietaisas pagrįstas fototerapijos principu (gydymu šviesos energija).

BioNette™ prietaisas naudoja žemo lygio ir siauro spektro šviesos technologiją.

NAUDOJIMO METODAS

Kiekvienas gydymo seansas trunka (apytiksliai) 4,5 min., prietaisą rekomenduojama vartoti nuo dviejų iki trijų kartų per dieną. Norint pasiekti maksimalų efektyvumą ir optimalų palengvėjimą, patartina **BioNette™** prietaisą pradėti naudoti iš karto, pastebėjus pirmuosius rinito simptomus. Pajutus pagerėjimą, naudojimo dažnumas turėtų būti palaipsniui mažinamas iki visiško nutraukimo.

BioNette™ – tai kompaktiškas įrenginys, puikiai telpantis net ir mažiausioje Jūsų kišenėje.

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

Ištraukite ploną, skaidrią sandarią juostelę, kurią rasite ant baterijos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kaip naudoti:


- Paspauskite ir palaikykite abejose prietaiso pusėse esančius guminius mygtukus. Netrukus pastebėsite du aiškius liežuvėlius, spinduliuojančius raudonos spalvos šviesą.
- Įsitikinkite, kad raudona šviesa yra tęstinė ir nemirksi.
- Laikydami paspaustus guminius mygtukus, raudonai šviečiančius liežuvėlius įdėkite į nosį.
- Lengvai atleiskite guminius mygtukus, tačiau neištraukite prietaiso iš nosies.
- Gydymo seansas yra baigtas, automatiškai išsijungus raudonai prietaiso šviesai, apytiksliai po 4,5 minutės. (Vieną kartą aktyvavus prietaisą, jis negali būti išjungtas visą gydymo ciklą).
- Atkreipkite dėmesį į prietaiso valymo instrukcijų aprašą.
- Rekomenduojama procedūrą atlikti 2-3 kartus per dieną. Prietaiso efektyvumas spartėja reguliariai kartojant fototerapiją.

Įspėjimas: • Naudojantis vaikams, būtina tėvų priežiūra. • Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį. • Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

BATERIJOS PAKAITIMAS

BioNette prietaisą sudaro 2 aukštos kokybės ličio CR2032 (3V)baterijos.

Nuimkite baterijos dangtelį ir įdėkite (2) baterijas į teisingą poziciją, kaip parodyta paveikslėlyje nr. 1

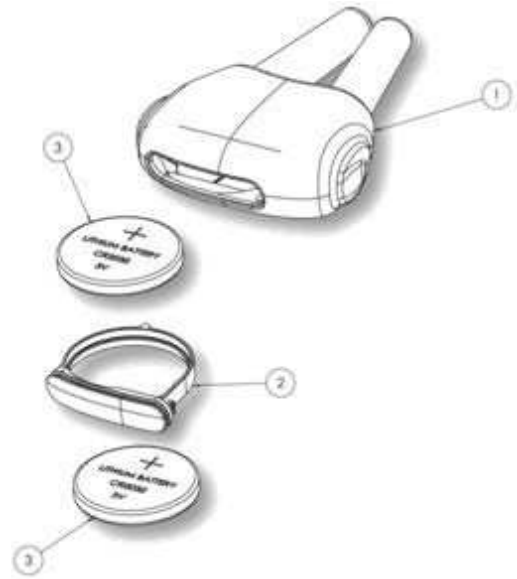

Pav. nr.1
Baterijos keitimas

TECHNINIAI DUOMENYS

Šviesos gydymas	Siauro spektro 630 nm šviesa
Apšvietimo galia	Minimali 4.0 mW kiekvienai šnervei
Energijos dozė	2 džauliai
Laikas	Paspaudus mygtukus, automatiškai išsijungia po (vidutiniškai) 4.5 minučių
Laiko tikslumas	+/- 15% nukrypimas
Maitinimo šaltinis	2X CR2032 (3v)
Srovė (Max)	0.3A
Baterijos galiojimas	Iki 80 kartų
Išsekusios baterijos indikatorius	Aktyvus LED(šviesos) mirksėjimas
Svoris	18 gramų kartu su baterija
Dydis	52x38x15 mm

POVEIKIS SU KITAIŠ VAISTAIS

Poveikis, vartojant BioNette™ prietaisą kartu su farmakologiniais vaistais, nėra žinomas. BioNette™ gali būti naudojamas kartu su antihistamininiais vaistais, kurie yra geriama bei kortikosteroidais.

ŠALUTINIS POVEIKIS

Nėra žinoma apie šio prietaiso sukeltą šalutinį poveikį. Žmonėms, kenčiantiems sunkų alerginį rinitą, patartina naudoti BioNette™ daugiau nei tris kartus per dieną, nesijaudinant dėl galimo nepageidaujamo efekto.

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE BIOLIGHT SERIJOS PRODUKTUS

BIOLIGHT produktų linija – pristatanti BioNette™ prietaisą – gamina medicinos prietaisus, naudojančius žemo lygio, siauros juostos šviesos technologijas, skirtas ne farmakologiniam gydymui. Šiuos produktus kuria mokslininkų ir gydytojų komanda, remdamasi fototerapijos poveikiu. Prietaisai tiekiami ligoninėms ir klinikoms, dauguma jų pripažintos prestižinėmis JAV gydymo įstaigomis, teikiančiomis kokybiškiausias paslaugas šalyje. BioNette™ mokslininkų pripažįstamas dideliu laimėjimu ne farmakologinio gydymo srityje, pasižymintis ypatingomis gydymo savybėmis ir neturintis jokio šalutinio poveikio.

BioNette™ siūlo modernią ir kokybišką alternatyvą rinito gydymui.

BioNette™ yra registruotas prekės ženklas.

VALYMAS

Valymas: Prietaise esantis šviesos šaltinis turi būti valomas minkštu drėgnu skudurėliu ir švelniu valymo tirpalu. Svarbu! **BioNette™** negalima panardinti į vandenį.

Sterilizacija: Rekomenduojama šviesos šaltinį valyti skudurėliu, sudrėkintu 70% alkoholyje.

Higiena: Svarbu laikytis visų Sveikatos apsaugos ministro nustatytų higienos reikalavimų.

GALIMŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Raudona šviesa neįsijungia	Baterija sena arba išseikvota	Pakeisti baterijas
	Baterija neteisingai įdėta	Pakeisti baterijas
	BioNette yra sugadintas	Jei išbandžius anksčiau minėtus sprendimo būdus, problema neišsprendžiama, susisieki su tiekėju
Raudonos šviesos šaltinis blykčioja	Baterijos yra silpnos	Pakeisti baterijas

Gamintojo garantija:

Gamintojas suteikia garantiją prietaisui ir užtikrina, kad prietaisas yra be defektų ir tinkamas naudojimui.

Garantija galioja 24 mėn. nuo pirkimo datos.

Garantija suteikiama remontui arba nemokamam atsarginių dalių keitimui, kurios sugedo įprastomis eksploataavimo sąlygomis ir jei prietaisas buvo naudojamas pagal instrukcijas, kurią pateikė gamintojas.

ĮSPĖJIMAS


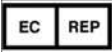





Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinius.

Naudojantis vaikams, būtina tėvų priežiūra.

Garantija negalioja:

- neteisingai naudojant prietaisą.
- bandant taisyti prietaisą patiems ar ne gamintojo atstovui.
- Netyčia sulaužius ar sugadinus prietaisą.
- Naudojant netinkamas baterijas.

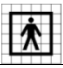PAKETO SIMBOLIAI

	Įspėjimo turi būti griežtai laikomasi		Įgaliotas atstovas Europos Bendrijoje
	Gamintojas		Naudojimosi instrukcija
	Tipas "BF" IEC 60601-1		Pagaminimo data
	WEEE – Elektros ir elektroninė įranga		




BioLight Medical Devices (HK) Ltd
Alliance Building, 130-136

Connaught Road, Central, HK

www.biolightMD.com

CE 0473 

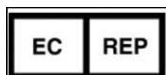

MEDES LIMITED, 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts, WD7 7AR, England,
Tel / Fax: + 44 19 23859810

Production is certified for: ISO 9001 (2008), MDD 2007/47 EEC (2007), ISO 13485 (2012) Cert. No. 499/499CE

The phototherapy technology & indication are patented.

The BioNette device is worldwide patent pending.



RoHS
2002/95/EC

Version 420.00.01. (rev 04) Date 01-01-2014

Made in P.R.C.

Gamintojas: BioLight Medical Devices Ltd.

Įgaliotasis platintojas: UAB „Interlux“, Aviečių g.16, LT-08418 Vilnius